

Medicarine®

Fertőtlenítő tabletta



- Széles hatásspektrum
- Aktív klórt tartalmaz
- Tojásfertőtlenítésre is
- Alacsony koncentráció az alkalmazás során
- minden egészségügyi intézményben alkalmazható



Fertőtlenítő klórtabletta

Alkalmazási terület:

Betegellátó intézményekben, élelmiszeriparban mosható fal- és padlóburkolatok, berendezési és felszerelési tárgyak, klórálló eszközök, felületek fertőtlenítésére.

Alkalmazási koncentráció és behatási idő betegellátó intézményekben			
Alkalmazás	Koncentráció		Hatásidő
	Tabelta	Víz/liter	
Felületfertőtlenítés szerves anyaggal nem szennyezett felületen	3 tabletta	10 liter	30 perc vagy hagyni kell a felületre száradni
	6 tabletta	9 liter	15 perc
A tuberkulocid hatás eléréséhez	4 tabletta	3 liter	15 perc
	8 tabletta	6 liter	15 perc
	10 tabletta	7,5 liter	15 perc
Felületfertőtlenítés szerves anyaggal szennyezett felületen és konkrét TBC fertőzöttség esetén	4 tabletta	1 liter	15 perc
	8 tabletta	2 liter	15 perc
	10 tabletta	2,5 liter	15 perc
Eszközfertőtlenítés szerves anyaggal nem szennyezett felületen	2 tabletta	10 liter	60 perc
	6 tabletta	9 liter	15 perc
A tuberkulocid hatás eléréséhez	4 tabletta	3 liter	15 perc
	8 tabletta	6 liter	15 perc
	10 tabletta	7,5 liter	15 perc
Eszközfertőtlenítés szerves anyaggal szennyezett felületen és konkrét TBC fertőzöttség esetén (pl laboratóriumi üvegedény)	4 tabletta	1 liter	15 perc
	8 tabletta	2 liter	15 perc
	12 tabletta	3 liter	15 perc
A tuberkulocid hatás eléréséhez	4 tabletta	1,5 liter	15 perc
	8 tabletta	3 liter	15 perc
	12 tabletta	4,5 liter	15 perc
Vér, váladék fertőtlenítése	10 tabletta	1,5 liter	15 perc
Ágyálfertőtlenítés(tuberkulocid hatás nélkül)	5 tabletta	10 liter	15 perc
Textília fertőtlenítés	2 tabletta	10 liter	60 perc
Élelmiszeriparban fertőtlenítés előzetes tisztítás után			
Felületfertőtlenítés	2 tabletta	10 liter	Rászárítani vagy 30 perc behatási idő után leöblíteni
Konyhai eszközök fertőtlenítése	2 tabletta	10 liter	5 perc
Tojásfertőtlenítés	2 tabletta	10 liter	10 perc

Eltartható:

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, °40C alatti, jól szellőztethető száraz helyiségekben, savaktól elkülönítve 1 évig.

Alkalmazás módja	
Szerves anyaggal nem szennyezett felületen bármilyen mosható felület-tárgy fertőtlenítésére, EÜ. berendezések fertőtlenítésére	A készítményből X tabletát kell feloldani vízben. Az elkészített oldattal kell fertőtleníteni a felületet vagy az oldatba meríteni a tárgyat
Bármilyen mosható, szerves anyaggal szennyezett felület fertőtlenítésére	A készítményből X tabletát kell feloldani vízben. Az így elkészített oldattal kell mosni a szennyezett felületet. Kiömlött vért, váladékot hatóanyagtartalmú oldattal kell leönteníeni és 5 perc után egyszer használatos törlőkendővel feltörni
Szerves anyaggal szennyezett eszköz, laboratórium üvegedény fertőtlenítésére	A tárgyat az előzetesen elkészített oldatba kell helyezni
Élelmiszeriparban a fertőtlenítési idő letelte után az élelmiszerrel érintkező felületeket és az eszközöket minden esetben ivóvíz minőségű vízzel alaposan le kell öblíteni	Élelmiszeriparban a fertőtlenítési idő letelte után a tyúktójást ivóvíz minőségű vízzel alaposan le kell öblíteni

A munkaoldatot minden a felhasználás előtt frissen kell elkészíteni!

Antimikrobiális spektrum:

Baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid.

Figyelmeztetés:

- Éghető anyagokkal való érintkezés tüzet okozhat.
- Savakkal érintkezve mérgező gázok fejlődnek.
- A tartály száraz helyen tárolandó.

Összetétel:

Nátrium-NN-diklórizocianurát. minden (2,72 g tömegű) tabletta 1,5 aktív klórtartalmaz.

Elsősegélynyújtás:

- Ha a készítmény porával, illetve a munkaoldattal szennyeződik a bőrfelület, azt azonnal bő vízzel mossuk le.
- Ha a készítmény szembe kerül, azt 15-10 percig tartó vizes szemöblítéssel kell eltávolítani és a sérültet szakorvosi ellátásban kell részesíteni.
- Lenyelés után a sérültet nyugalomba kell helyezni, a szájüreget vízzel alaposan ki kell leöblíteni, bőségesen vízzel vagy tejet kell itatni. Hánytatni nem szabad. Azonnal orvost kell hívni.

Kiszerelés:

6 tartály × 300 tabletta
papírkartonban csomagolva

Engedélyezési szám:

JKF/7257-4/2015

ECOLAB®